

Antes de proceder à colheita, por favor leia atentamente as instruções a seguir descritas.


## PROCEDIMENTO:

1. A colheita terá que ser realizada para um tubo **Streck** (ref: Cell-Free DNA BCT® CE).
2. Identifique o Tubo Streck com no **mínimo 2 identificadores**, por exemplo, nome e data de nascimento da grávida;
3. Esterilize a região de colheita e recolha entre **7-10mL** de sangue para o Tubo Streck por método de vácuo;
4. Imediatamente após colheita, agite cuidadosamente os tubos 8 a 10 vezes (mistura inadequada ou tardia poderá condicionar o resultado do teste);
5. A amostra deve ser mantida e transportada à temperatura ambiente (20-25°C, 68-77°F);
6. Certifique-se que a entrega da amostra chega dentro no **máximo em 4 dias após colheita** ao:

**CGC Genetics/Centro de Genética Clínica**

*Rua Sá da Bandeira, 706-1o*

*4000-432 Porto, Portugal*

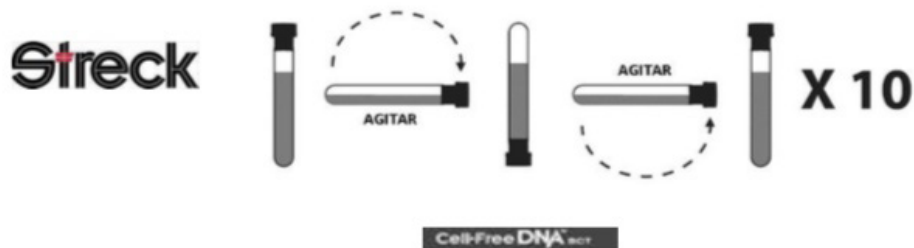

## ATENÇÃO, O TESTE NÃO PODE SER REALIZADO SE:

- A amostra de sangue for inferior a 7 mL;
- O tubo não estiver adequadamente identificado;
- O Formulário de Requisição não estiver devidamente preenchido e assinado pelo médico requisitante;
- O Consentimento Informado da Grávida não estiver assinado pela mesma.

Para encontrar respostas às perguntas mais frequentes, consulte [www.tomorrowtest.com](http://www.tomorrowtest.com)

Para mais informações, envie um email para [tomorrow@cgcgenetics.com](mailto:tomorrow@cgcgenetics.com) ou ligue +351 223 326 608, de segunda a sexta, 09:00-18:00 (GMT/UTC + 00:00).