

TOMORROW

test prenatal no invasivo

INSTRUCCIONES DE TOMA DE MUESTRA


Antes de proceder a la toma, por favor lea atentamente las instrucciones descritas a continuación:

PROCEDIMIENTO:

1. Recoja la muestra de sangre en un tubo **Streck** (ref.: Cell-Free DNA BCT[®] CE).
2. Identifique el Tubo Streck con un **mínimo de 2 identificadores**, por ejemplo, nombre y fecha de nacimiento de la paciente;
3. Esterilice la región de toma y recoja entre **7–10 mL** de sangre para el Tubo Streck por sistema de vacío
4. Inmediatamente después de la toma, agite cuidadosamente los tubos de 8 a 10 veces (una mezcla inadecuada o tardía podría condicionar el resultado del test);
5. La muestra debe ser mantenida y transportada a temperatura ambiente (20-25°C, 68-77°F);
6. Asegúrese que la entrega se realice en un **máximo de 4 días después de la toma** en:

CGC Genetics

*Rua Sá da Bandeira, 706-1^º
4000-432 Porto, Portugal*

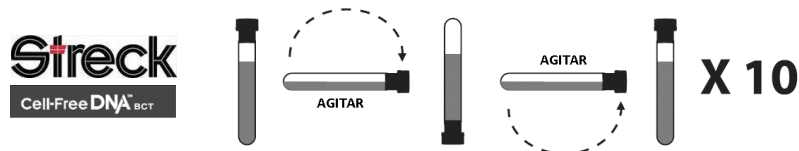

ATENCIÓN, el test no puede ser realizado si:

- La muestra de sangre es inferior a 7 mL;
- El tubo no está identificado adecuadamente;
- La Hoja de Solicitud **TOMORROW** no está debidamente relleno y firmado por el médico prescriptor;
- EL Consentimiento Informado de la Paciente no está firmado por la misma.

- Para encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes, consulte www.tomorrowtest.com
- Para más información, envíe un email a customercare@cgcgenetics.com o llame al +351 223 389 900, de lunes a viernes 09:00-18:00 (GMT/UTC + 00:00).